

機種名： 超音波診断装置 Philips iE 33

20 年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
装置本体の汚れ																																Daily 目視確認/拭き取り
液晶ディスプレイ 汚れ・調整																																Daily 目視確認/拭き取り
液晶タッチパネル 汚れ・反応																																Daily 拭き取り/動作確認
ディスプレイアーム 異常確認																																Daily 拭き取り/動作確認
コントロール・モジュール ロック																																Daily
タイヤ 異常確認																																Daily 動作確認
キーボード 異常確認																																Daily 動作確認
コントロールパネル 異常確認																																Daily 表示確認
電源ケーブル 異常確認																																Daily 外れていないか
LANケーブル異常確認																																Daily 外れていないか
心電図 異常確認																																Daily 目視確認/ゲル拭き取り
日付・時刻・確認																																Daily 表示確認
トランジューサー各種 点検																																Daily 亀裂断裂/ゲルの拭き取り
通信確認																																Daily 日常検査にて確認
トラックボール 異常確認																																Daily 日常検査にて確認
経食道トランジューサー 点検																																検査前に亀裂断裂確認
経食洗浄液 使用期限確認																																検査前に期限確認
HD残容量確認・削除																																Weekly (Monday)
白黒プリンター																																Monthly 動作確認
カラープリンター																																Monthly 動作確認
ビデオデッキ/DVDレコーダー																																Monthly 動作確認
DVDドライブ																																Monthly 動作確認
ハードディスクメンテナンス																																Monthly ※添付 1
エアフィルター																																3Months ※添付 2
点検者サイン																																

備考：